
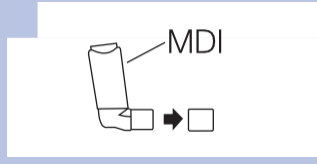



Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ


Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem prawidłowego montażu, obecności części obcych oraz uszkodzonych lub brakujących części. Przed użyciem należy usunąć obce przedmioty. W przypadku uszkodzenia lub braku którejkolwiek z części produktu należy go natychmiast wymienić.

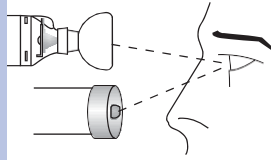


Zdejmij nasadkę z dozownika aerozolu.
Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś instrukcję dołączoną do dozownika aerozolu.

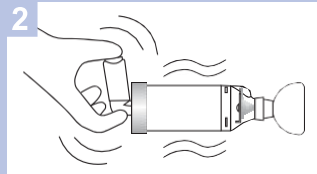


Włóż dozownik aerozolu do tylnej części komory. Przytrzymaj mocno komorę podawania aerozolu dla kotów AeroKat* oraz dozownik aerozolu i szybko potrząśnij urządzeniem 4 do 5 razy bezpośrednio przed każdym użyciem.

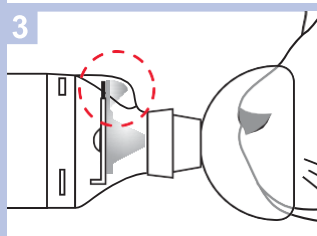


Delikatnie umieścić maskę na twarzy i upewnić się, że jest ona skutecznie uszczelniona. Podczas gdy kot wykonuje wdech, wskaźnik przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) powinien trzepotać lub poruszać się w kierunku kota. Jeśli Twój kot cierpi z powodu niepokoju podczas wykonywania tych czynności, porozmawiaj z lekarzem weterynarii o poradę.

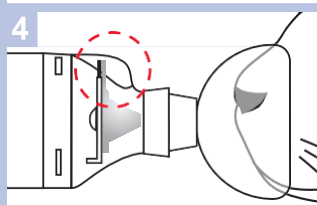

Flow-Vu* IFI powraca do pozycji pionowej, gdy kot przestaje wdychać lub gdy wykonuje wydech.

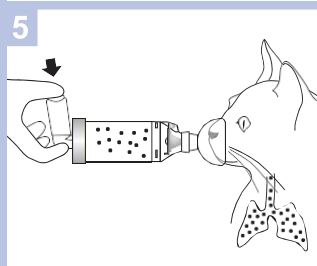


Podczas gdy kot wykonuje wdech, naciśnij dozownik aerozolu i przytrzymaj maskę na twarzy kota przez 5 - 6 oddechów. Utrzymać skuteczne uszczelnienie i użyć Flow-Vu* IFI do policzenia liczby oddechów. Należy upewnić się, że przestrzegane są instrukcje lekarza weterynarii dotyczące dawkowania i że jednorazowo podawana jest tylko jedna dawka leku.

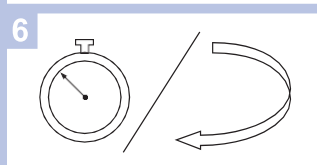


Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dozowniku aerozolu dotyczącymi czasu oczekiwania przed powtórzeniem kroków 2-5 zgodnie z instrukcjami.


Instrukcja czyszczenia

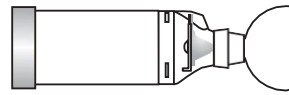


Komorę do podawania aerozolu AeroKat* dla kotów ze wskaźnikiem przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) należy czyścić przed pierwszym użyciem, a następnie co tydzień.

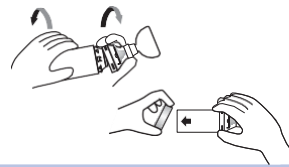


Zdjąć tylko tył, adapter maski i maskę.
NIE WOLNO próbować usuwać żadnych innych części.

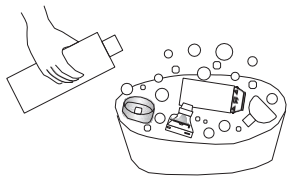


Namoczyć wszystkie części w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń i letniej czystej wody przez 15 minut. Delikatnie mieszać tam i z powrotem.

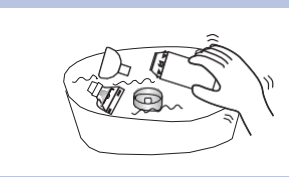


Wypłukać części w czystej wodzie.

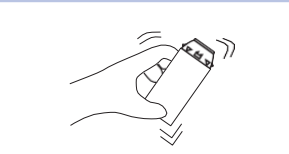

Strząśnij nadmiar wody z części i pozwól im wyschnąć na powietrzu stojąc w pozycji pionowej.

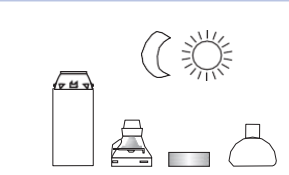

Przed ponownym montażem należy upewnić się, że części są suche. Nie wycierać do sucha.

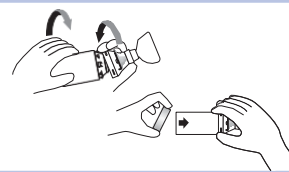

Gdy urządzenie jest całkowicie suche i gotowe do użycia, należy ponownie zamocować tył, adapter maski i maskę.

Przeznaczenie

Do stosowania z dozownikiem aerozolowym zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

Ostrzeżenia

- Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii i przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem.
- Nie należy pozostawiać komory spryskiwacza aerozolowego dla psów AeroKat* bez nadzoru w obecności dzieci.
- Demontować produkt tylko w zakresie zalecanym w instrukcji czyszczenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
- Komora do primingu aerozolu dla psów AeroKat* jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z niniejszą instrukcją. NIE wolno go myć w zmywarce do naczyń.
- Jeśli nie masz pewności co do stosowania tego produktu, porozmawiaj z lekarzem weterynarii

Uwagi

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do dozownika aerozolu.
- Ten produkt nie zawiera lateksu.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania lub przydatności tego produktu, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
- Instrukcje w innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.aerodawg.com).



Wyprodukowane przez:

Trudell Medical International*

725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4
Fax: +1(519) 455-7858 E-Mail: aerokat@trudellmed.com
www.aerokat.com

AeroKat*
Komora do podawania aerozoli dla kotów