



Instrukcja Obsługi

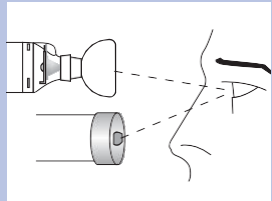


PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ


Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem prawidłowego montażu, obecności ciał obcych oraz uszkodzonych lub brakujących części. Przed użyciem należy usunąć obce przedmioty. W przypadku uszkodzenia lub braku którejkolwiek z części produktu należy go natychmiast wymienić.

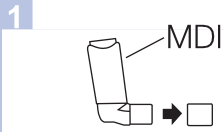


Zdejmij nasadkę z dozownika aerozolu. Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś instrukcję dołączoną do dozownika aerozolu.

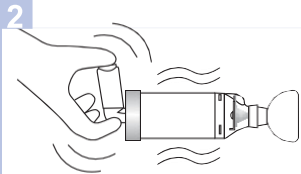


Włóż dozownik aerozolu do tylnej części komory. Przytrzymaj mocno komorę gruntowania aerozolu dla psów AeroDawg* i dozownik aerozolu i szybko potrząśnij urządzeniem 4 do 5 razy bezpośrednio przed każdym użyciem.

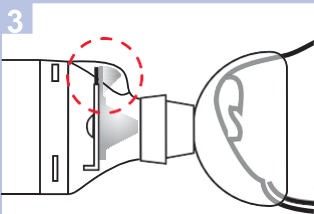


Delikatnie nałożyć maskę na pysk i upewnić się, że jest ona skutecznie uszczelniona. Podczas gdy pies wykonuje wdech, Flow-Vu*. Wskaźnik przepływu wdechowego (IFI) powinien trzepotać lub poruszać się w kierunku psa. Jeśli Twój pies cierpi z powodu niepokoju podczas wykonywania tych czynności, porozmawiaj z lekarzem weterynarii o poradę.

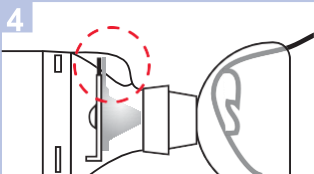

Flow-Vu* IFI powraca do pozycji pionowej, kiedy pies przestaje brać wdech lub kiedy robi wydech..

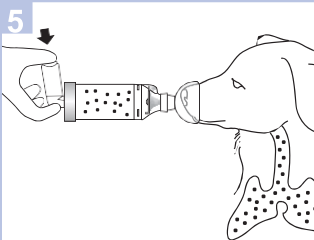


Podczas gdy pies wykonuje wdech, należy nacisnąć dozownik aerozolu i przytrzymać maskę na pysku przez 3 - 5 oddechów. Utrzymać skuteczne uszczelnienie i użyć Flow-Vu* IFI do policzenia liczby oddechów. Upewnić się, że instrukcje lekarza weterynarii dotyczące dawkowania są przestrzegane i że jednorazowo podawana jest tylko jedna dawka leku.

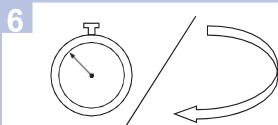


Postępuj zgodnie z instrukcjami dozownika aerozolu dotyczącymi czasu oczekiwania przed powtórzeniem kroków 2 - 5 zgodnie z instrukcjami.


Instrukcja czyszczenia

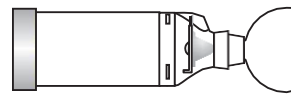


Komorę do podawania aerozolu dla psów AeroDawg* ze wskaźnikiem przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) należy czyścić przed pierwszym użyciem, a następnie co tydzień.

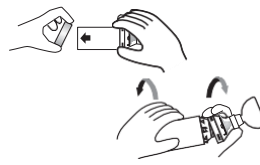

Zdjąć tylko tył, adapter maski i maskę. NIE WOLNO próbować usuwać żadnych innych części.

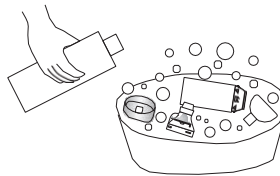


Namoczyć wszystkie części w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń i letniej czystej wody przez 15 minut. Delikatnie mieszać tam i z powrotem.

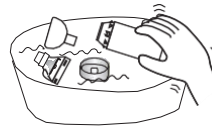


Wypłukać części w czystej wodzie.



Strząśnij nadmiar wody z części i pozwól im wyschnąć na powietrzu stojąc w pozycji pionowej.

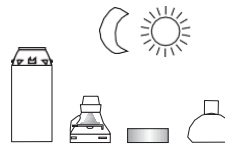

Przed ponownym montażem należy upewnić się, że części są suche. Nie wycierać do sucha.

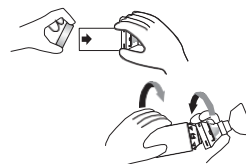

Gdy urządzenie jest całkowicie suche i gotowe do użycia, należy ponownie zamocować tył, adapter maski i maskę.

Przeznaczenie

Do stosowania z dozownikiem aerozolowym zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

Ostrzeżenia

- Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii i przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem.
- Nie należy pozostawiać komory spryskiwacza aerozolowego dla psów AeroDawg* bez nadzoru w obecności dzieci.
- Demontować produkt tylko w zakresie zalecanym w instrukcji czyszczenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
- Komora do primingu aerozolu dla psów AeroDawg* jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z niniejszą instrukcją. NIE wolno go myć w zmywarce do naczyń.
- Jeśli nie masz pewności co do stosowania tego produktu, porozmawiaj z lekarzem weterynarii

Uwagi

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do dozownika aerozolu.
- Ten produkt nie zawiera lateksu.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania lub przydatności tego produktu, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
- Instrukcje w innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.aerodawg.com).



Wyprodukowane przez:

Trudell Medical International*

725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4
Fax: +1(519) 455-7858 E-Mail: aerodawg@trudellmed.com
www.aerodawg.com

AeroDawg*

Komora do podawania aerozoli dla psów

MD-744A-0308. US-Patent angemeldet. * Eine Handelsmarke von Trudell Medical International. © 2004, 2008 Trudell Medical International. Alle Rechte vorbehalten.